

**FIRST**  
— BEAUTY —



# SAUNA A INFRAROSSI

MODELLO COCONICE

## MANUALE D'USO

Versione 1.00 redatto il 25/10/2019

# 1. Indice

1. Indice .....	2
2. Introduzione .....	3
3. Le principali funzioni del Coconice .....	3
4. Avvertenze .....	6
5. Disposizioni Generali .....	6
6. Trasporto e disimballo .....	6
7. Destinazione d'uso .....	7
8. Applicazioni estetiche SAUNA INFRAROSSO .....	7
9. Temperatura e tempi di lavoro.....	8
10. Controindicazioni.....	9
11. Manipolazione del prodotto.....	11
12.. Significato dei simboli.....	12
13. Utilizzo .....	14
14. Manutenzione preventiva e riparazioni .....	16
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....	18

## 2. Introduzione

COCONICE è una apparecchiatura elettromeccanica, tipo sauna, per il trattamento generalizzato del corpo per mezzo di calore.

Ogni tipo di crescita dipende dalla luce solare, ma il 40% dei raggi ultravioletti e dei raggi ad alta energia del sole sono dannosi per il corpo umano; mentre il restante 60% dell'energia solare è benefica, compresi i raggi infrarossi.

Le nostre saune ad infrarossi usano questi invisibili raggi infrarossi (5.6-15 $\mu$ m) per aumentare la risonanza del tessuto cellulare, accelerare la circolazione sanguigna e migliorare le funzioni organiche.

La terapia della sauna ad infrarossi sta diventando molto popolare e ben accettata in medicina, sempre più supportata da studi su questa nuova scienza.

Una sauna ad infrarossi può aiutare ad alleviare il dolore e migliorare la guarigione dalle ferite e il recupero, aumentando la circolazione sanguigna. L'aumento del tasso metabolico testato in una sauna ad infrarossi in realtà brucia calorie quando il corpo inizia a sudare. Questo aiuta a bruciare i grassi, migliorare il ritmo cardiaco, rafforzare il cuore, ad eliminare le tossine, la cellulite e migliora il tono generale della pelle. Una sessione di 30 minuti in una sauna ad infrarossi fa sì che vengano bruciate le stesse calorie di una corsa di 10 km.

Il sistema stereo di alta qualità inserito nelle nostre saune favorisce il rilassamento con la musicoterapica.

## 3. Le principali funzioni del Coconice

### **Infrarosso:**

I raggi infrarossi, anche detti radiazioni infrarosse o IR, sono radiazioni impiegate ormai da anni in campo medico, terapeutico ed estetico, specialmente per trattamenti dimagranti e rigeneranti cellulari.

I raggi infrarossi rappresentano il 56% dei raggi irradiati dal sole, ed è a loro che si deve la sensazione di "calore", per questo motivo vengono anche chiamati radiazioni termiche o radiazioni di calore. È grazie al loro calore che la terra e noi tutti viviamo.

Le radiazioni termiche hanno la caratteristica di scaldare molto in profondità ciò con cui vengono a contatto senza scaldare l'aria circostante.

Negli esseri umani queste radiazioni producono calore nel momento in cui vengono assorbite dai tessuti e, grazie ai liquidi corporei e alla legge fisica della conduzione, vengono poi trasmessi in profondità ancora maggiori, accelerando il metabolismo dei tessuti, la vasodilatazione dei capillari, il rilassamento muscolare e apportando numerosi benefici alla salute, al contrario dei raggi UV.

In particolare, i raggi infrarossi vengono largamente adoperati in campo estetico perché consentono di tonificare, rassodare, bruciare i grassi, riattivare la circolazione ed eliminare le tossine dal corpo.

Queste radiazioni riscaldano piacevolmente la parte interessata, penetrano nel tessuto adiposo e vanno a stimolare il metabolismo, facilitando l'espulsione di tossine e grassi. Nello specifico, la massa adiposa viene riscaldata fino a 4 cm di profondità, così da rendere il grasso caldo bio disponibile al suo consumo.

Inoltre, quando ci si sottopone ad una seduta di raggi infrarossi la sua azione termica dura fino a 48 ore dopo, il che significa che se si pratica dell'attività fisica in quest'arco di tempo si consumerà molto più grasso e il tessuto sarà più ricettivo e vascolarizzato.

### **Ozono:**

L'ozono è un gas che, in natura, si forma nell'atmosfera grazie a scariche elettriche che modificano la stabile struttura molecolare dell'ossigeno (O<sub>2</sub>), trasformandolo in O<sub>3</sub>.

Una molecola di ozono è quindi formata da tre atomi di ossigeno ed è instabile: uno dei tre atomi tende infatti a separarsi per unirsi ad altre strutture molecolari, facendo ritornare la molecola di ossigeno (O<sub>2</sub>) alla sua forma stabile.

Ma è proprio da questa instabilità che derivano le sue proprietà benefiche.

L'instabilità dell'Ozono e quindi la sua capacità di trasformarsi in ossigeno gli conferisce un'incredibile capacità ossidante che uccide i batteri attaccando la struttura molecolare delle loro membrane protettive e alterandone gli enzimi interni.

Inoltre, è estremamente efficace anche su virus, funghi, muffe, pesticidi, metalli pesanti, nitrati, nitriti e altre sostanze potenzialmente dannose. Inoltre, veicola ossigeno ed esplica numerose altre funzioni biologiche.

### **Cromoterapia:**

I colori sono manifestazioni di energia e utilizzati sapientemente nella cromoterapia possono aiutare a recuperare l'armonia psichica ed emotiva e a influenzare la salute.

La cromoterapia è un metodo terapeutico di medicina alternativa non verificato che usa il significato dei colori per curare diversi disturbi. Ha una lunga tradizione in quanto il significato dei colori è stato indagato ed utilizzato fin dall'antichità e spesso si sovrappone con altre discipline antiche di medicina alternativa, come la fototerapia, la cromopuntura e l'ayurveda.

Il **rosso** è il colore per eccellenza portatore di energia: incrementa i battiti del cuore, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa, migliorando la circolazione del sangue e stimolando il sistema nervoso e ghiandolare, fegato e nervi sensitivi.

Il **giallo** può essere utile a chi pratica sport: aumenta tono neuro-muscolare, la prontezza di riflessi, migliora la digestione, svolge un'attività purificatoria sull'intestino e permette di ridurre il gonfiore addominale.

Le funzioni di tiroide e milza possono essere regolarizzate, invece, **dall'arancione**, che è l'associazione tra il giallo e il rosso.

Il **verde** è un colore neutro quindi le sue proprietà sono molteplici, soprattutto di riequilibrio generale delle funzioni del corpo.

Il **blu**, colore freddo per eccellenza, stimola il sistema parasimpatico e ha una funzione opposta al colore rosso: riduce pressione arteriosa, ritmo del cuore e della respirazione. È quindi estremamente indicato per ridurre l'agitazione.

### **Musicoterapica:**

Da una ricerca fatta su un gruppo di bambini tra i 4 e i 6 mesi a due diversi tipi di ascolto musicale, risultava che più l'armonia musicale era perfetta (HRM), maggiore era la calma e la tranquillità, la serenità e l'attenzione. Le esecuzioni dissonanti erano invece accompagnate da nervosismo, irritazione e pianto. E' l'ennesima prova che fin dalla nascita il cervello dell'uomo accentua il suo stato di benessere sotto l'effetto di musiche armoniose.

a musica aiuta ad eliminare progressivamente stati di nervosismo, di ansia, angoscia, difficoltà di ordine psicosomatico come cefalee, stanchezze muscolari. La musica si indirizza direttamente al corpo, ai sensi, allo spirito. Certe musiche classiche e "newage" sono elementi determinanti per combattere lo stress. Lo stress può essere definito un'intensa reazione emozionale a degli stimoli esterni che mettono in moto delle risposte fisiologiche. In questa risposta il sistema neurovegetativo interviene attraverso la stimolazione nervosa della midollare del surrene che immediatamente mette in circolo una scarica di adrenalina e noradrenalina. Queste catecolamine determinano l'aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, del ritmo respiratorio, alterano cioè l'equilibrio dei ritmi di alcune funzioni vitali. Inizia così la discesa verso il disagio che giorno per giorno si aggrava perchè ci trova sempre più fragili e indifesi.



**La destinazione d'uso, i tipi di trattamenti effettuabili e le precauzioni di impiego sono descritte in modo esteso nei paragrafi successivi**



**Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto**

## 4. Avvertenze

### SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'UTILIZZATORE

Per accedere alla sauna è necessario essere in buone condizioni di salute.

E' buona norma sentire il parere del medico prima dell'uso.

**NON TOCCARE MAI LE PIASTRE**

**DI IRRADIANZA POSIZIONATE NELLA**

**PARTE SUPERIORE DEL MACCHINARIO**



## 5. Disposizioni Generali

Il presente manuale è parte integrante dell'apparecchiatura ed è stato preparato per il suo uso corretto e sicuro.

Prima dell'uso del macchinario leggere ogni informazione e istruzione in esso contenuta.

Ogni operatore dovrà attenersi a quanto ivi riportato.

Questo manuale deve seguire il macchinario per tutta la sua vita operativa.

Il costruttore declina ogni responsabilità per qualunque danno generato da cattivo uso o negligenza e/o errate interpretazioni delle presenti istruzioni.

Per ogni dubbio e/o chiarimento contattare Short Channel Srl riferendosi sempre al numero di matricola indicato sull'apparecchiatura.

N.b: verificare l'esistenza di ulteriori disposizioni normative a livello di singola Regione (ASL)

## 6. Trasporto e disimballo

1. Sfilare l'apparecchiatura dal suo imballo scatola facendo molta attenzione.
2. Verificare che non vi siano danni causati al trasporto.
3. Nel caso in cui un pezzo dovesse mancare o risultare danneggiato, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore.

## **7. Destinazione d'uso**

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in studi estetici autorizzati e conformi a tutte le norme vigenti; il personale che lo utilizza deve avere la competenza professionale stabilita dalla legge 1/90 (per ottenere informazioni complete si invita a consultare la legge citata). Inoltre, prima di iniziare ad operare, deve leggere il manuale e familiarizzare con tutti i requisiti di sicurezza e con le procedure operative.

Le informazioni contenute in questo manuale non sostituiscono l'addestramento professionale all'utilizzo specifico dell'apparecchio.

## **8. Applicazioni estetiche SAUNA INFRAROSSO**

Fa dimagrire e brucia sino a 900 K-calorie in una seduta.

Elevata e benefica sudorazione.

Riduzione di stress, fatica, tensione da lavoro, stanchezza e insonnia.

Ringiovanisce, purifica e rende molto elastica la pelle.

Elimina le cellule morte, apre tutti i pori ed elimina sebo e punti neri.

Previene l'insorgere di tumori cutanei.

Genera grandissimo senso di tranquillità, calma e relax.

Diminuisce la ritenzione idrica.

Previene ed elimina cellulite, acne, psoriasi, eczemi e dermatiti.

Fluidifica il sangue, migliora la circolazione sanguigna.

Stabilizza la pressione circolatoria.

Riduce le tensioni muscolari, le rigidità articolari e i problemi reumatici.

Allena passivamente il muscolo cardiaco.

Riduce colesterolo e trigliceridi.

Previene e allevia arteriosclerosi e osteoporosi.

Previene e allevia i sintomi dell'artrosi cervicale.

Attira gli ioni di calcio alla parete cellulare con azione terapeutica nelle patologie ossee.

Favorisce la naturale produzione di collagene e diminuisce le rughe.

Migliora e stimola il metabolismo e i processi digestivi.

Predispose il corpo alle attività sportive ed evita l'insorgere di crampi e stiramenti.

Rafforza il sistema immunitario e combatte germi e virus.

Disintossica e purifica poiché elimina le tossine dall'organismo: metalli, residui farmaceutici, residui del trucco, nicotina, caffeina, acidi, arsenico, ecc. che sono notoriamente scorie pericolosissime nel nostro corpo, in quanto responsabili di gravi processi degenerativi, sino al cancro.

Favorisce il naturale linfodrenaggio, eliminando le sostanze nocive dai linfonodi.

Migliora la respirazione e favorisce l'eliminazione di muco e catarro.

Predispose il corpo al massaggio e all'assorbimento di essenze.

Riduce le infiammazioni, i gonfiori, le tumefazioni e allevia un gran numero di dolori (mestruali, emicrania, contratture, stiramenti, contusioni, ecc.), favorendo anche la sensibile diminuzione nell'assunzione di farmaci anti-dolorifici.



**Attenersi scrupolosamente alle avvertenze presenti nel seguente manuale**



**Ulteriori approfondimenti sull'utilizzo sono presenti nel Protocollo d'Uso che SHORT CHANNEL SRL fornisce a corredo del dispositivo acquistato**

## 9. Temperatura e tempi di lavoro

Il corpo, all'interno della cabina a raggi infrarossi, assorba una maggiore quantità di calore rispetto alla sauna finlandese.

Può essere quindi utilizzata per ottenere gli stessi benefici della sauna tradizionale, ma ad una temperatura inferiore (di circa 60 °C) per un periodo di trattamento di 15-40 minuti.

LA TEMPERATURA RACCOMANDATA E' DI 60 GRADI.

Recenti studi hanno dimostrato come questo tipo di cabina consenta di espellere molte più tossine e sostanze dannose per il corpo come colesterolo, metalli pesanti, sodio, ammoniaca e acido urico rispetto alle saune tradizionali, realizzando un vero e proprio effetto detox.



## 10. Controindicazioni

**Nel caso raro in cui si verificano dolore e/o disagio, interrompere immediatamente l'uso della sauna.**

### **Farmaci**

Individui che utilizzano farmaci da prescrizione dovrebbero chiedere il parere del loro medico personale o del farmacista . Diuretici, barbiturici e beta-bloccanti possono alterare i meccanismi di perdita di calore naturale del corpo. Alcuni farmaci da banco come antistaminici possono esporre più facilmente il fisico al “colpo di calore”.

### **Bambini**

La temperatura corporea dei bambini si alza molto più velocemente rispetto agli adulti. Consultare il pediatra di un bambino prima di utilizzare una sauna.

### **Gli anziani**

La capacità di mantenere la temperatura corporea diminuisce con l'età. Questo è dovuto principalmente a condizioni circolatorie e alla diminuita funzionalità delle ghiandole sudoripare. Il corpo deve essere in grado di attivare i processi di raffreddamento naturali al fine di mantenere la temperatura corporea.

### **Condizioni cardiovascolari**

Gli individui con condizioni cardiovascolari o problemi di ipertensione, ipotensione, insufficienza cardiaca, o ridotta circolazione coronarica o coloro che stanno assumendo farmaci che possono influire sulla pressione sanguigna devono prestare molta attenzione quando esposti al calore prolungato.

### **Condizioni croniche**

Di seguito le malattie associate ad una ridotta capacità di sudare :

Morbo di Parkinson, sclerosi multipla, problemi nervosi, tumori, diabete con neuropatia .

Emofiliaci / individui inclini a sanguinamento

Dovrebbe essere evitata l'esposizione ad infrarossi nei soggetti predisposti all' emorragia .

### **Febbre**

In presenza di febbre non si dovrebbe usare la sauna.

### **Insensibilità al calore**

Un individuo con insensibilità al calore non dovrebbe usare la sauna.

### **Gravidanza**

Le donne incinte dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare una sauna perché con una certa temperatura elevata del corpo può verificarsi un danno al feto .

**Ciclo mestruale**

Il riscaldamento della zona posteriore inferiore delle donne durante il periodo mestruale può aumentare temporaneamente il loro flusso . Alcune donne sopportano questo processo per ottenere comunque sollievo dal dolore comunemente associato con il loro ciclo, mentre altre scelgono semplicemente di evitare l'uso della sauna in quel periodo del mese.

**Impianti**

Perni metallici, articolazioni artificiali o qualsiasi altro impianto chirurgico in genere riflette le onde infrarosse e quindi non vengono riscaldati con questo sistema. Tuttavia, dovrete consultare il vostro medico prima di utilizzare una sauna a infrarossi. Certamente l'utilizzo di una sauna a infrarossi deve essere comunque interrotta se avvertite dolori vicino ad uno qualsiasi di tali impianti.

## 11. Manipolazione del prodotto

L'operatore non deve indossare particolari equipaggiamenti.

Gli eventuali errori di utilizzo, in accordo con la CEI EN 60601-1-6:2008, valutati nell'analisi del rischio sull'intero dispositivo, non possono causare danni all'operatore o al paziente in quanto disattivati dal dispositivo stesso e comunque riconoscibili tempestivamente.

Gli accorgimenti per un corretto utilizzo sono elencati di seguito.



- **Mantenere l'apparecchio sempre pulito e in ordine. La corretta pulizia dell'apparecchiatura e la disinfezione dei suoi accessori, dovrà essere effettuata con l'utilizzo di un panno morbido , leggermente inumidito con acqua o clorexidina**
- **Non appoggiare alcun oggetto sull'apparecchio e/o sul cavo di alimentazione dello stesso**
- **Non versare liquidi sopra o accanto all'apparecchio. Nel caso ciò dovesse comunque avvenire, NON accendere l'apparecchio, o se già acceso spegnerlo immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata**
- **Non usare l'apparecchio ed i suoi accessori in luoghi dove potrebbero bagnarsi**
- **Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dal costruttore nel caso di danneggiamento o deterioramento degli accessori**
- **Per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare mai il cordone di alimentazione dello stesso**
- **Spegnere sempre l'apparecchiatura prima di inserire o rimuovere il connettore di alimentazione dal suo alloggiamento**
- **Interrompere i trattamenti prima di spegnere l'apparecchiatura**

## 12. Significato dei simboli

### ETICHETTA POSTA SUL DISPOSITIVO



**PRODUTTORE E ANNO DI PRODUZIONE**



**ATTENZIONE**



**CONSULTARE IL MANUALE D'USO**



**APPARECCHIO DI TIPO BF**



**AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE**

#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

*Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151*

*"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il dispositivo SAUNA A INFRAROSSI è un'unità fissa che va collocata su un piano. Ogni superficie piana e stabile è adatta per l'installazione dell'unità, facendo attenzione alle precauzioni riportate di seguito.



- **NON** collocare l'apparecchio su superfici che potrebbero bagnarsi
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico progettato e realizzato in conformità alle leggi e norme vigenti
- **NON** posizionare l'apparecchio sotto esposizione diretta dei raggi solari.
- Mantenere una distanza di almeno 2 metri dai radiatori di calore
- **NON** coprire le griglie di aerazione delle ventole posteriori
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio
- Disporre il cavo di alimentazione rete in maniera che non possa essere calpestato
- Non versare liquidi sopra o accanto all'apparecchio. Nel caso ciò dovesse comunque avvenire, **NON** accendere l'apparecchio, o se già acceso spegnerlo immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata

## 13. Utilizzo

Preriscaldare la cabina per alcuni minuti seguendo la procedura di seguito descritta per l'attivazione.


La console di comando è composta da 4 parti che sono attivabili in maniera autonoma.

**PARTE A (EVIDENZIATA IN ROSSO) COMANDI DEI LED**

**PARTE B (EVIDENZIATA IN AZZURRO) COMANDI DEGLI INFRAROSSI**

**PARTE C (EVIDENZIATA IN VERDE) COMANDI OZONO**

**RADIO**

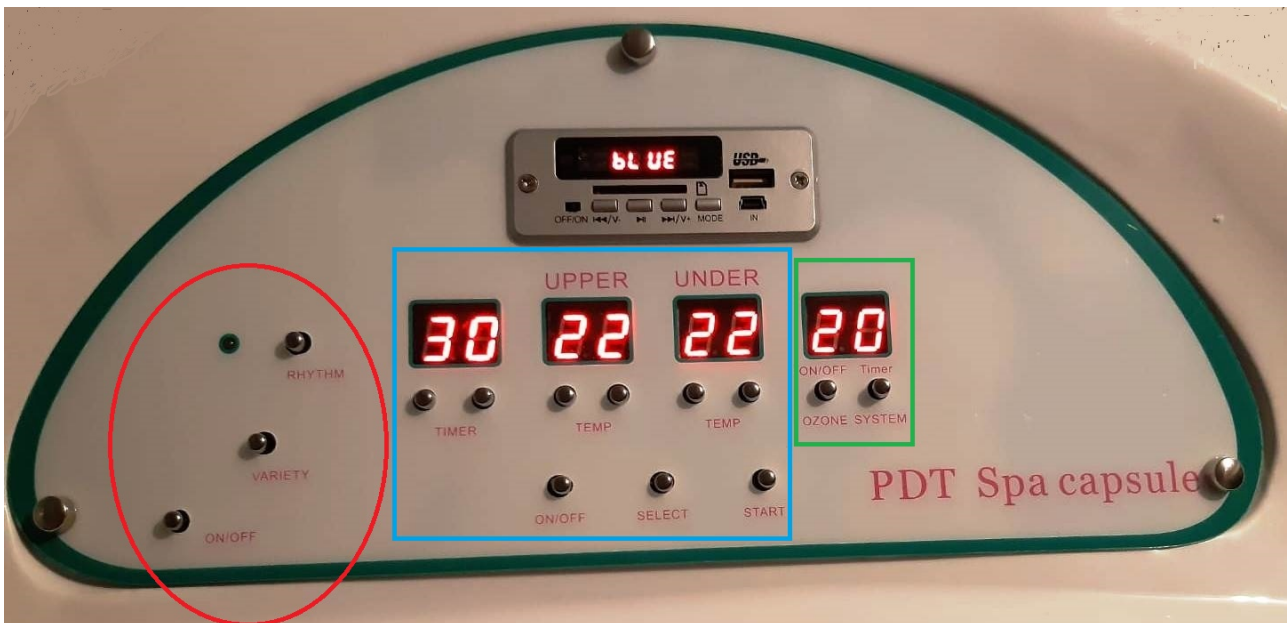

**PARTE A (EVIDENZIATA IN ROSSO) COMANDI DEI LED**

Per accendere/spegnere la cromoterapia premere il pulsante "ON/OFF"

Con il pulsante "VARIETY" si seleziona il colore.

Con il pulsante "RYTHIM" si seleziona attiva la modalità a tempo di musica.

## PARTE B (EVIDENZIATA IN AZZURRO) COMANDI DEGLI INFRAROSSI

Per accendere/spegnere gli infrarossi premere il pulsante "ON/OFF".

Una volta accesa la PARTE B è necessario:

- 1) Impostare il tempo della seduta
- 2) Scegliere se attivare la sezione infrarossi superiore, la sezione infrarossi inferiore o entrambe
- 3) Far partire la seduta.

Con la sezione "TIMER" si imposta il tempo del trattamento.

Il tempo di default è 30 minuti ma è possibile variarlo fino a 60 minuti.

Con la sezione "UPPER TEMP" e "UNDER TEMP" si imposta rispettivamente la temperatura delle lampade a infrarossi della parte superiore e di quelle inferiore.

Per ogni sezione sono presenti 2 pulsanti per la regolazione della temperatura.

Con il pulsante di sinistra si aumenta il tempo di decine.

Con il pulsante di destra si aumenta il tempo di unità.



Con il pulsante "SELECT" si seleziona quali sezioni attivare nella seduta.

Premendo una volta il pulsante SELECT si attiva sola la sezione "UPPER".

Premendo due volte il pulsante SELECT si attiva sola la sezione "UNDER".

Premendo TRE volte il pulsante SELECT si attivano entrambi le sezioni.

NB: Le sezioni attivate per la seduta sono evidenziate mediante la presenza di un puntino vicino alla temperatura impostata.

Una volta scelte tutte le impostazioni premere il pulsante "START" per cominciare la seduta.

## PARTE C (EVIDENZIATA IN VERDE) COMANDI OZONO

Per accendere/spegnere l'ozono premere il pulsante "ON/OFF"

Con il pulsante "TIMER" si imposta il tempo.

## RADIO

Il Coconice è provvisto di un impianto stereo\radio con il quale è possibile ascoltare la radio, collegare tramite bluetooth il proprio telefono o riprodurre file audio mediante una SCHEDA DATI.

## 14. Manutenzione preventiva e riparazioni

Il dispositivo SAUNA A INFRAROSSI non necessita di particolari accorgimenti di manutenzione, se non le normali precauzioni di utilizzo già descritte nei paragrafi precedenti.



**Le coperture delle lampade a infrarossi devono essere sempre integre: se si riscontra un'assenza di integrità superficiale totale, questi vanno sostituiti per non andare incontro ad ustioni.**

Il cambio dei fusibili nel filtro di rete deve avvenire secondo le indicazioni del produttore del filtro e cioè, semplicemente, aprendo lo sportellino e sostituendo il fusibile con uno di quelli in dotazione.



## 18. Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	SAUNA A INFRAROSSI
<b>Alimentazione</b>	90 – 240 V
<b>Potenza assorbita</b>	1500 W
<b>Corrente assorbita</b>	7A
<b>Temperatura</b>	0-90 C°
<b>Peso</b>	50 kg
<b>Dimensioni</b>	L 220 x P 90 x H 110 cm
<b>Condizioni di esercizio</b>	Temperatura ambiente: 10°C < T < 40°C
	Umidità ambiente: 30 - 75%
	Pressione: 700 - 1060 hPa
<b>Condizioni di conservazione e trasporto</b>	Temperatura ambiente: -10°C < T < 70°C
	Umidità ambiente: MAX 95%

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

<b>NOME DEL FABBRICANTE</b>	SHORT CHANNEL S.r.l.
<b>INDIRIZZO DEL FABBRICANTE</b>	Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125, Partita IVA 03521920987– REA 541224
<b>DESIGNAZIONE DELL'APPARECCHIO</b>	Apparecchio per trattamento locale di calore ad uso estetico
<b>N° DI TIPO O MODELLO</b>	SAUNA A INFRAROSSI MODELLO COCONICE
<b>N° DI SERIE</b>	Vedi etichetta alluminio in basso
<b>ANNO DI FABBRICAZIONE</b>	2019
<b>CLASSE E TIPO DELL'APPARECCHIO</b>	1 BF
<b>NORME PERTINENTI</b>	CEI 60601-1; CEI 60601-1-2; CEI 60601-1-6 Apparecchi elettromedicali, prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale
<b>DIRETTIVE DI RIFERIMENTO</b>	2006/95/CEE (bassa tensione) 2004/108/CEE (compatibilità elettromagnetica) CEI 62-39 Apparecchi elettrici per uso estetico 2006/95/CE Direttiva bassa tensione EN 61000-6-1 Normativa EMC EN 61000-6-3 Normativa EMC D.L. 110/2011 (regolamento attuazione Legge 1/90)

Firma e timbro Amministratore

Data \_\_\_\_\_

Short Channel S.R.L.- Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125  
[www.sprayabbronzante.com](http://www.sprayabbronzante.com) Tel. +39 030 2535015  
Partita IVA 03521920987– REA 541224

## 15. Garanzia

Queste condizioni di garanzia si intendono aggiuntive e non sostitutive di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui l'acquirente è titolare ai sensi del Dlgs. 2.02.2002 n. 24 che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo.

1. Il dispositivo è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
2. Per 'garanzia' si intende la riparazione o sostituzione dei componenti o delle parti dell'apparecchio riconosciuti da SHORT CHANNEL S.r.l. difettosi nella fabbricazione o nel materiale. In ogni caso SHORT CHANNEL S.r.l. si riserva, a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso. La presente garanzia non copre danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti. Inoltre SHORT CHANNEL S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali in conseguenza della mancata osservazione delle prescrizioni indicate nel manuale d'uso e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.
3. Questa garanzia sarà riconosciuta una volta che verrà data comunicazione ad SHORT CHANNEL S.r.l. del guasto del dispositivo e una volta accertata la data di fatturazione.
4. L'acquirente, una volta accertato il guasto, potrà convenire con SHORT CHANNEL S.r.l. le modalità di invio del dispositivo presso SHORT CHANNEL S.r.l.  
La garanzia non si applica ai danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati e non conformi alle avvertenze e indicazioni riportate sul manuale d'uso, da cattivo uso, da maltrattamento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, danni provocati da un uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Altre forme di assistenza potranno essere concordate con SHORT CHANNEL S.r.l. per soddisfare requisiti di urgenza.
6. Se durante il periodo di garanzia una o più parti vengono sostituite per la riparazione con una o più parti non autorizzate da SHORT CHANNEL S.r.l., o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportuni per lo stesso o ancora se la riparazione viene effettuata da personale non autorizzato da SHORT CHANNEL S.r.l., l'acquirente perde il diritto alla riparazione in garanzia SHORT CHANNEL S.r.l.

Sono esclusi dalla presente garanzia tutti gli accessori a corredo.

Una volta scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione saranno a carico dell'acquirente.