


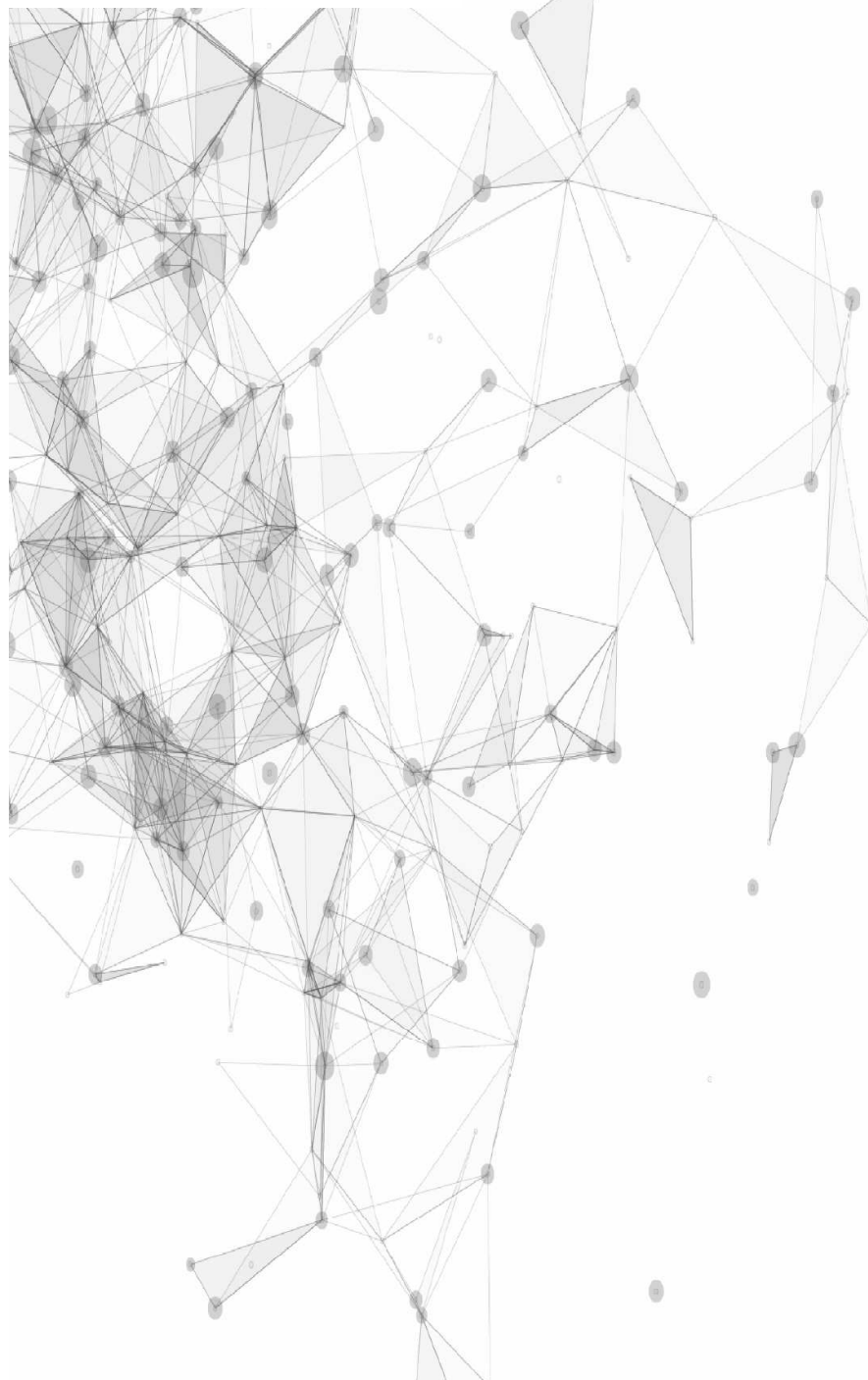

FIRST
— BEAUTY —



MANUALE D'USO
FIRST BEAUTY PRESS

SOMMARIO

AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

IMPOSTAZIONI INIZIALI

PROGRAMMI DI LAVORO

MONTAGGIO SETTORI

FIRST

— BEAUTY —



Gentile cliente,

grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Per una corretta funzione e per maggior sicurezza, si prega di leggere bene le istruzioni contenute nel presente manuale prima dell'uso.

FIRST BEAUTY

AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

- Si prega di non utilizzare l'apparecchiatura in vicinanza di acqua o con le mani bagnate. Prestare attenzione a non versare liquidi su di essa.
 - Si prega di non smontare l'apparecchio o di provare a fare qualche altra operazione, che non siano state indicate in questo manuale d'uso. Tutto il lavoro di riparazione deve essere effettuato dal nostro personale competente ed autorizzato.
- Si prega di scollegare la spina dalla presa quando si verificano le seguenti condizioni e contattare l'azienda per una manutenzione tecnica.
 - L'attrezzatura si bagna
 - L'attrezzatura emette odori, fumi o forti rumori.
 - Rottura del cavo di alimentazione o dei manipoli.
 - Il sistema è rotto o non funzionante.
- Si prega di non mettere alcun oggetto sopra i cavi e non posizionare l'apparecchio in luoghi dove qualcuno possa calpestarli.
- Per la vostra sicurezza, si prega di scollegare il cavo dopo l'utilizzo.
- Non mettere nulla nella presa di lavoro, ciò può causare incendi o corti circuiti con l'elettricità. Se qualsiasi corpo estraneo dovesse entrare all'interno dell'apparecchiatura, si prega di non ritrarlo fuori da soli ma contattare immediatamente il produttore.
- Si prega di appoggiare l'attrezzatura su supporti rigidi e resistenti per evitare cadute accidentali e danni al sistema.
- La società produttrice ha facoltà di modificare le informazioni fornite in questa documentazione senza alcun preavviso.
- L'applicazione della macchina non deve mai essere troppo doloroso e causare gravi arrossamenti alla pelle o segni permanenti.
- Se i sintomi non hanno alcun miglioramento, o in caso di dubbi sull'utilizzo, consultare il medico.
- La macchina è progettata solo per uso professionale, qualsiasi uso personale di questo dispositivo è assolutamente vietato.
- Il prodotto viene fornito con i seguenti elementi. Una volta ricevuto lo strumento, si prega di controllare tutti gli accessori, in caso di mancanza di alcuni di questi, fare riferimento al personale.
- Se durante il trasporto si lesionano alcuni elementi, si prega di segnalarlo immediatamente inviando comunicazione a FIRST BEAUTY.
- Non smontare la macchina né applicare modifiche senza aver precedentemente consultato il manuale d'uso. Per qualsiasi evenienza contattare FIRST BEAUTY.
- Per motivi di sicurezza staccare sempre il cavo di alimentazione al termine di ogni trattamento.
- Non far penetrare nessun elemento all'interno della macchina durante il trattamento, se accidentalmente ciò accade e non è possibile l'estrazione, spegnere immediatamente il sistema e staccare il cavo di alimentazione. Contattare il personale tecnico della FIRST BEAUTY.
- L'alimentazione deve essere conforme a quella specifica indicata in etichetta, altrimenti il sistema potrebbe accusare dei malfunzionamenti o danni.

Qualora si verificassero danni notevoli, o incomprensioni contattare il servizio clienti della FIRST BEAUTY all'indirizzo e-mail : info@first-beauty.it

IMPOSTAZIONI INIZIALI

- a. Premere il tasto O/I per accendere FIRST BEAUTY PRESS : l'apparecchiatura automaticamente si accende e appare la schermata di lavoro.



- b. Impostare il tempo del trattamento
c. Impostare tempo di gonfiaggio e sgonfiaggio dei settori (1 a 10)

È possibile selezionare o deselezionare i singoli settori, impostando il settore interessato a 0.

- d. Scegliere il programma di lavoro e selezionare l'intensità di gonfiaggio (1,2,3).
e. Premere il tasto Start per iniziare il trattamento ed utilizzare FIRST BEAUTY PRESS.

Indicatore Tempo del trattamento



Indicatore del tempo di gonfiaggio di ogni settore



Indicatore di Intensità di gonfiaggio (1 bassa, 2 media, 3 alta)



Premere per inizia il trattamento e per tornare alla schermata principale "Home



PROGRAMMI DI LAVORO



PROGRAMMA 1: I settori vengono gonfiati uno alla volta partendo dai piedi salendo fino alle braccia, poi tutte contemporaneamente.



PROGRAMMA 2: Vengono gonfiati 2 settori contemporaneamente partendo dal centro (busto) fino all'estremità (braccia e piedi); poi i settori vengono gonfiati in modo incrociato.

PROGRAMMA 3: Vengono gonfiati 3 settori contemporaneamente partendo dalle estremità (braccia e piedi) fino al centro (busto)

PROGRAMMI PRESSOMASSAGGIO	
PROGRAMMA 1	Drenante Emolinfatico
PROGRAMMA 2	Drenante Riducente
PROGRAMMA 3	Drenante Tonificante

MONTAGGIO SETTORI

Per collegare i settori partire dal settore 0 a sinistra e procedere inserendo i successivi connettori fino al settore 9.

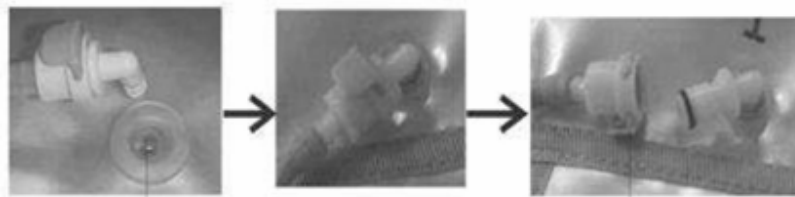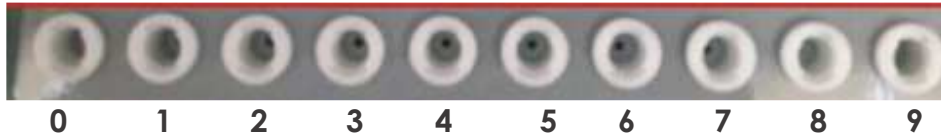

Collegare al bottone

staccare premendo il tasto blu

COLLEGAMENTO DEI SETTORI AL MARSUPIO



DESCRIZIONE E NUMERAZIONE DEI SETTORI



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOME DEL FABBRICANTE	SHORT CHANNEL S.r.l.
INDIRIZZO DEL FABBRICANTE	Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125, Partita IVA 03521920987– REA 541224
DESIGNAZIONE	Apparecchio per uso estetico
MODELLO	FIRST BEAUTY PRESS
TARGA DATI	
CLASSE DELL'APPARECCHIO	I TIPO B
NORME PERTINENTI	Directive 2002/96 / EC WEEE CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - File 3639 R - 1998 - CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Part 9891 - 2009 - Fifth Edition + EC1 - Safety of laser products CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - File 3639 R - 1998 - First Edition - Electrical apparatus for aesthetic use. General guidance for security and variants
DIRETTIVE DI RIFERIMENTO	2006/95/CEE – bassa tensione 2004/108/CEE – compatibilità elettromagnetica
	Firma Amministratore
	Marco Papetti
Data _____	_____